

Start-temperatur (°C)	Trockenzeit (min)	Schliesszeit (min)	Vorwärmzeit (min)	Vakuum-level	Temperaturanstiegsrate (°C/min)	Endtemperatur (°C)	Vakuum-haltezeit V (min:sec)	Haltezeit (min:sec)	erste Abkühlstufe (min)	zweite Abkühlstufe (min)
START °C	MIN	MIN	MIN	VAC %	°C MIN	END °C	VAC HOLD MIN SEC	HOLD MIN SEC	1 MIN	2 MIN

3M ESPE

LAVA Ceram

Shoulder material 1	450	3	1	0	100	45	840		01:00	0	0
Shoulder material 2	450	3	1	0	100	45	830		01:00	0	0
Dentin and incisal firing 1	450	4	2	0	100	45	810		01:00	0	0
Dentin and incisal firing 2	450	4	2	0	100	45	800		01:00	0	0
Glaze firing with glaze or stain	480	1	1	0	0	45	790		01:00	0	0
Glaze firing without glaze or stain	480	1	1	0	0	45	820		01:00	0	0